

2022年9月（第1版）

製造届出番号：13B2X10479302020

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル JMDN コード：34077000

妊活セット ME-087

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。


【形状・構造及び原理等】

形状・構造

本品は、下記の原材料で作られています。

原材料

名称	成分
カテーテル	シリコン
シリンジ	ポリプロピレン

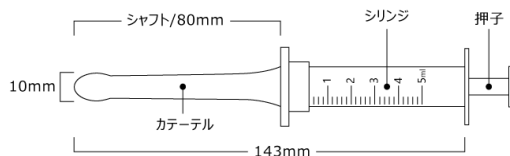

【使用目的又は効果】

1. 本品は膈内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 1) 本品1回の使用です。まず、採精容器を取り出してください。
- 2) 採精容器に精液を採取してください。
- 3) 採取した精液をカテーテル先端よりシリンジの押し子を引いて吸引してください。
- 4) カテーテルを膈に挿入して、シリンジの押し子を押し精液を注入してください。
- 5) 注入後、速やかにカテーテルとシリンジを外さずに膈から抜いてください。
- 6) 精液の注入後は、リラックスできる体勢で、安静にしてください。

【使用上の注意】

1. 本品は使用直前に開封してください。
2. 本品の使用より発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が認められた場合には、使用を中止し、医師に相談してください。
3. 痛みを感じる場合は、無理に使用せず使用を中止してください。使用中止後も痛みが続く場合は専門医の診察を受けてください。
4. 本品は一回使い切りです。再利用はせずに使用後は必ず破棄してください。
5. 膈内の創傷の原因になるため、以下の事項は行わないでください。
 - (1) 本品に対して曲げ、切削、加圧等
 - (2) 粗雑な取り扱い（傷をつける、落下させる、強い衝撃を与える）
6. シリンジと押し子は本品に同封されたものを使用し、本品以外のシリンジ・押し子を使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

- ・涼しく乾燥した場所に保管する。

有効期限：

- ・未開封品の保存期間：5年

注意：使い捨て品、二次使用不可です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町1-1-1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)

使用前に必ずご参照下さい。